

SPECIÁLIS VÉRALVADÁSI MINTÁK PREANALITIKAI TEENDŐI

- Mintavétel citrátos csőbe: protein C, protein S, APC-rezisztencia, antitrombin III, lupus antikoaguláns
- Minden markerre külön citrátos csövet kell levenni.
- Eljárás célja: a mintákat kétszer kell centrifugálni, mivel a speciális véralvadási vizsgálatokhoz thrombocytamentes plazmára van szükség

Első centrifugálási lépés: A primer csövet 10 percig kell centrifugálni 1000-2000 g-n, majd ezt követően a plazma felső 2/3-át szekunder csőbe kell átszívni egy Pasteur pipetta segítségével, ügyelve, hogy a határréteget ne érintsük (az összes cső plazmáját közös szekunder csőbe kell pipettázni)

Második centrifugálási lépés: A szekunder csövet további 10 percig (1000-2000 g) kell centrifugálni, ezt követően a plazma felső 2/3-át tercier csövekbe kell szétosztani, ügyelve, hogy az alját ne érintsük.

Thrombocytamentes plazma szétosztása:

- 5 vizsgálat esetén legalább 4 csőbe
- 4 vizsgálat esetén legalább 3 csőbe
- 3 vizsgálat esetén 3 csőbe
- 2 vizsgálat esetén 2 csőbe
- 1 vizsgálat esetén 2 csőbe

